

Anleitung zum Wechseln der originalen Zangeneinsätze für die Universalohrmarkenzange

1. Lösen Sie die seitlichen Schrauben in beiden Zangenbacken (s. Bohrung im **roten** und **schwarzen** Clip)
2. Danach ziehen/schieben Sie die (vor-) montierten Einsätze nach oben heraus.
3. Nun drücken Sie jeweils die Klammern nach vorn und schieben die gewünschten Zangeneinsätze in die Vorrichtung und montieren die in 1 gelösten Schrauben wieder fest
4. **Wichtig:** das **Dornenteil** muss auf die Seite des **roten** Clips und das **Lochteil** auf die des **schwarzen** Clips (Klammer auf Lochteil-Seite ist schwenkbar und besitzt eine größere Aussparung, sodass bei Verwendung von Gewebeohrmarken der Probenbehälter in die Bohrung eingeführt werden kann -> grauer Zangeneinsatz!)

